

Navnelapp

Epidural

Spinal

Kontrollskjema CADD-Legacy PCA pumpe ved spinal og epidural administrasjon.

Kontroll gjennomføres x 1 per vakt ved sykepleier (D/A/N).

Medikamenter/ innhold pr. ml:

Hastighet/ bolus/sperretid: Dato/kl: Sign. lege:..... (nytt skjema v/endring)

Dato																				
Klokkeslett																				
Gjennomføres daglig:																				
Posevolum ml																				
Enheter ml																				
Kont hastighet ml/t																				
Bolus mengde ml																				
Sperretid																				
Bolus per time																				
Bolus akseptert																				
Bolus forsøk																				
Totalt infundert ml																				
Luft detektor (av)																				
Gj.strøm sensor (av)																				
Låse nivå (LN2)																				
Sjekk av innstikkssted																				
Signatur spl.																				
Gjennomføres ukentlig:																				
Skift av batteri																				
Stell av inn-/utstikksted																				
Bytte filter																				
Skifte av medisinpåse																				
Signatur spl.																				
Signatur spl (dobbeltktr)																				

Følg pumpens bruksanvisning		
Programmering og endring av pumpens innstillinger	<ul style="list-style-type: none"> • Programmeres av sertifisert lege/sykepleier, låses i Låsenivå 2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt vakthavende lege på Palliativt senter ved behov for hjelp
Kontroll	<ul style="list-style-type: none"> • Alle innstillinger og endringer kontrolleres av to kvalifiserte personer opp mot legens ordinasjon • Pumpen kontrolleres på hver vakt (D/A/N) av sykepleier og dokumenteres på skjema 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroll av pumpen innbefatter rett innstilling i henhold til legens ordinasjon i og at infundert mengde medikament samsvarer med siste kontroll
Luftdetektor og gjennomstrømssensor	<ul style="list-style-type: none"> • Alltid av 	
Batteri	Skiftes: <ul style="list-style-type: none"> • x 1/uke 	
Etter bruk	<ul style="list-style-type: none"> • Kassett/deksel skal være montert, for å beskytte pumpen • Pumper returneres Seksjon for behandlingshjelpemidler (eksterne) eller til anesthesiavdelingen (interne) 	

Lenke til undervisningsvideoer: <https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/tunnelert-spinal-eller-epiduralkateter>

Behandlingsansvar lege ved Palliativt senter. Palliativ sengepost: 51518923 Palliativt team (dagtid): 51518901

Sist endret 14.04.21